


1.

Legen Sie das Face-
shield wie in der Ab-
bildung auf eine
glatte Oberfläche.


----- Wichtig! -----
Links und Rechts
beachten! Material
kann sonst brechen!

Klappen Sie die Bügel
vorsichtig entlang der
rot markieren Linie
nach außen.

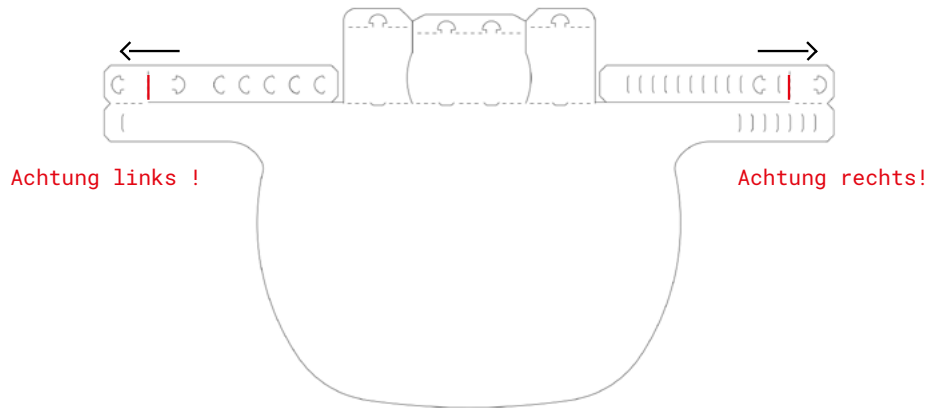


2.

Klappen Sie die ge-
falteten Bügel entlang
der roten Linie nach
unten.

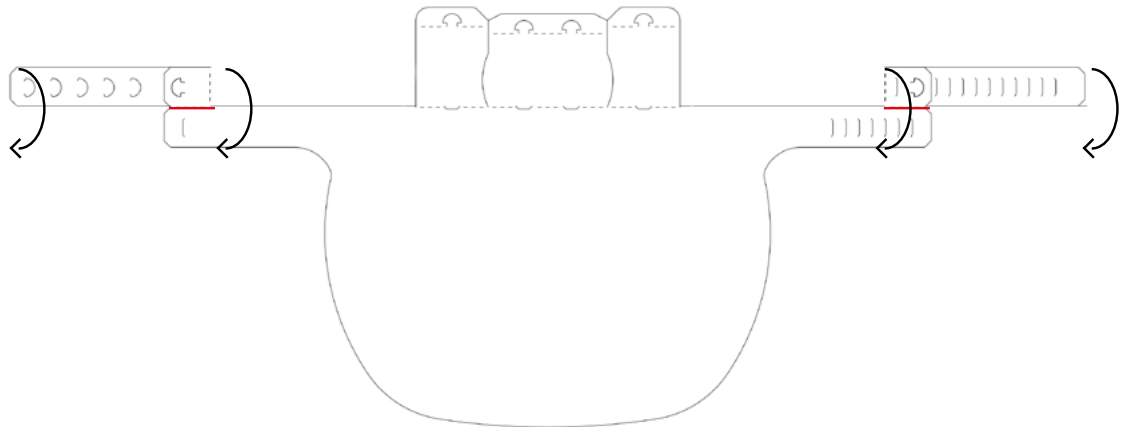

3.


Drücken Sie die
überlappenden Pilze
zusammen durch
den Schlitz.

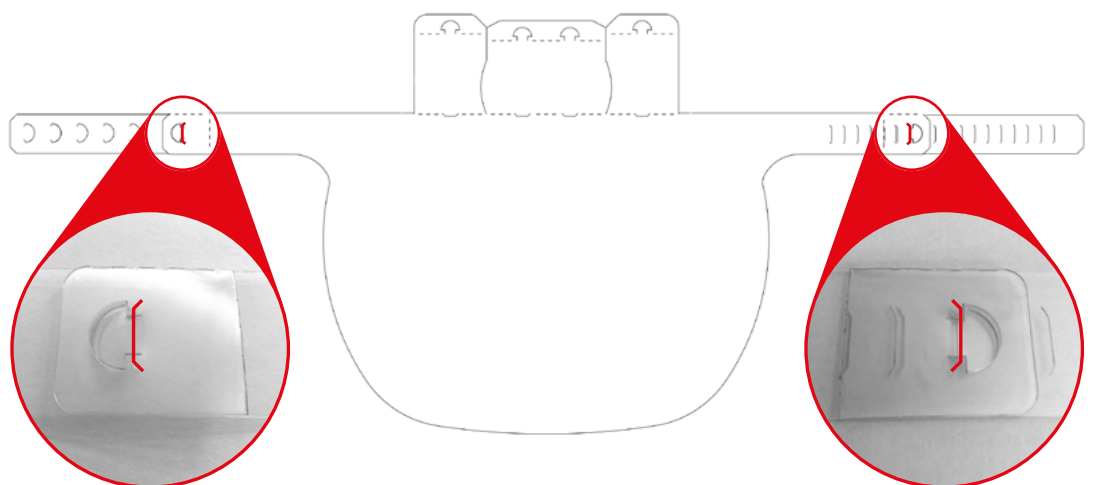

4.

Klappen Sie die 3 obigen Bauteile entlang der roten Linie nach unten und formen Sie eine Rolle.

Befestigen Sie die Rollen indem Sie die Pilze durch die Schlitze führen.

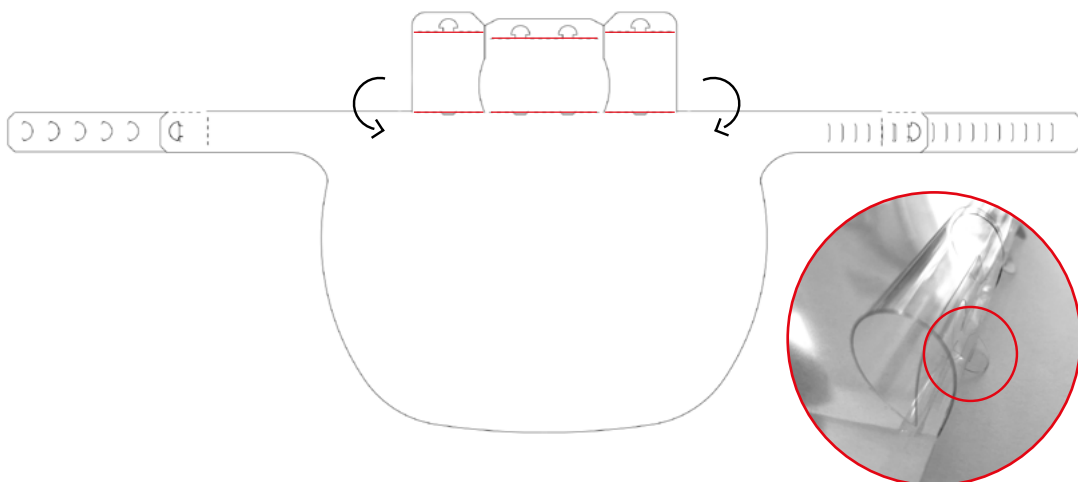


5.

Schieben Sie die Rollen für eine optimale Stirnrundung ineinander.

Achten Sie darauf, dass die Rollen wie in Abbildung 7 nach unten gerichtet sind. Sie dienen zwischen Stirn und Visier als federndes Polster.

Legen Sie das Faceshield um den Kopf und verschließen es mit einem oder zwei Haken am Hinterkopf.

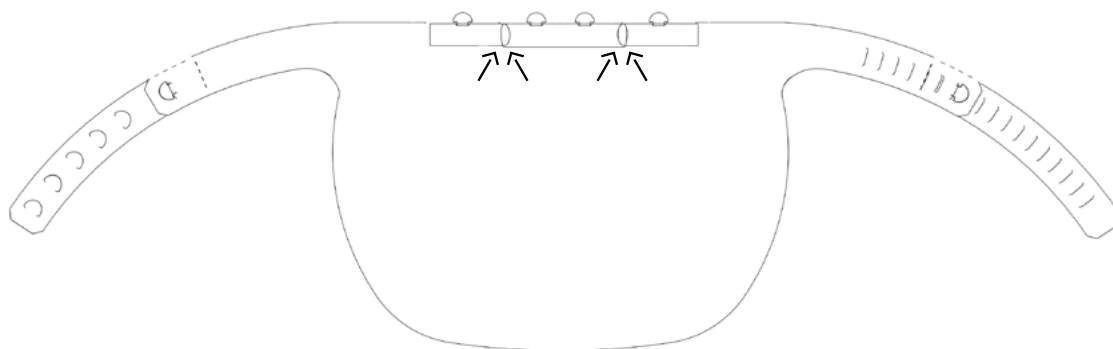

6.

Abbildung 6

Überprüfen Sie den Sitz der Haken (Abbildung 6).

Überprüfen Sie den Sitz der federnden Rollen an der Stirn (Abbildung 7).



Abbildung 7

